


フットマッサージャー フットサロン EP1510

取扱説明書

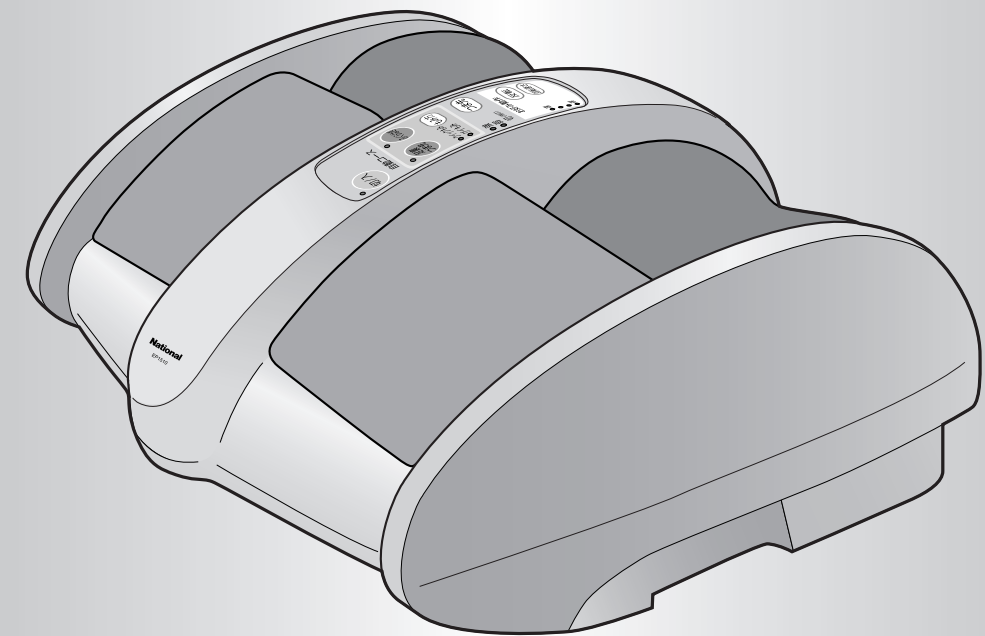

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」(1～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめの上、お受け取りください。

National

持込修理

ナショナル フットサロン保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EP1510
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電話 () - _____
販売店	住所・氏名 _____
	電話 (()) - _____

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

B No.1

キリトリ線

安全上のご注意


ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。


いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は「分解禁止」)

 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を伝えるものです。
(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」です)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



必ず守る

- 医師の治療を受けているときや下記の人には必ず医師と相談の上使用する。
(1)ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
(2)悪性腫瘍(しゅよう)のある人
(3)心臓に障害のある人
(4)妊娠中、出産直後の人
(5)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
(6)骨粗しょう症の人、捻挫、肉離れなどの急性疼(とう)痛性疾患の人
(7)かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
(8)体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき。)
(9)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
(10)脚部に重度の血行障害のある人
(11)上記以外に身体に特に異常を感じているとき
守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと火災や感電のおそれがあります。



禁止

- 布団やコタツの中またはホットカーペットの上及び暖房器具の近くでは使用しない。
火災や感電のおそれがあります。
- 足またはふくらはぎのマッサージ以外の目的では使用しない。
事故やけがのおそれがあります。
- お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせない。
事故やけがのおそれがあります。
- 本体の上に乗って使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。
- 本体布カバーや着脱カバーが破れた状態や内部構造が露出した状態、外れた状態では使用しない。
(直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼する。)
けがや感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。
火災や感電のおそれがあります。
- 変圧器を用いた使用はしない。
火災や感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショート、発火、故障のおそれがあります。
- 自分で意志表示ができない人に使わせない。
また、自分で操作できない人への使用はさせない。
事故やけがの原因になります。



分解禁止

- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。
発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

⚠️ 注意

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●使用中に身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●マッサージは1回15分以内にする。守らないと逆効果やけがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。守らないと感電や発火の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●持ち運ぶときは、両手で持って運ぶ。守らないと落下による故障やけがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●本体を立てて保管しない。守らないと本体が倒れて故障やけがの原因になります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●足、ふくらはぎ以外には使用しない。けがの原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグや機器のすき間にピンやゴミ、水分を付着させない。感電やショート、発火、故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●つま先部を持って本体を持ち運ばない。落下してけがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●つま先部の上にのらない。破損してけがや故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●他の治療器と同時に使用しない。事故や体調をくずすおそれがあります。
 水場使用禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室など湿気の多い場所で使わない。感電や故障の原因になります。
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●本体には水などをこぼさない。感電やショート、故障の原因になります。
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。感電ややけどのおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って抜く。感電やショート、発火の原因になります。

もくじ

ご使用前に

- 安全上のご注意..... 1
- 各部のなまえ..... 5
- 準備..... 6

使いかた

- 足裏・つま先をマッサージする..... 7
- ふくらはぎをマッサージする..... 10
- マッサージが終わったら..... 11

お手入れ・Q&A


- お手入れのしかた..... 12
- 保管..... 12
- 着脱カバーの取り付け方と外し方..... 13
- Q & A..... 14

お知らせ


- 定格・仕様..... 15
- こんな異常を感じたら..... 16
- 保証とアフターサービス..... 17

各部のなまえ

本体

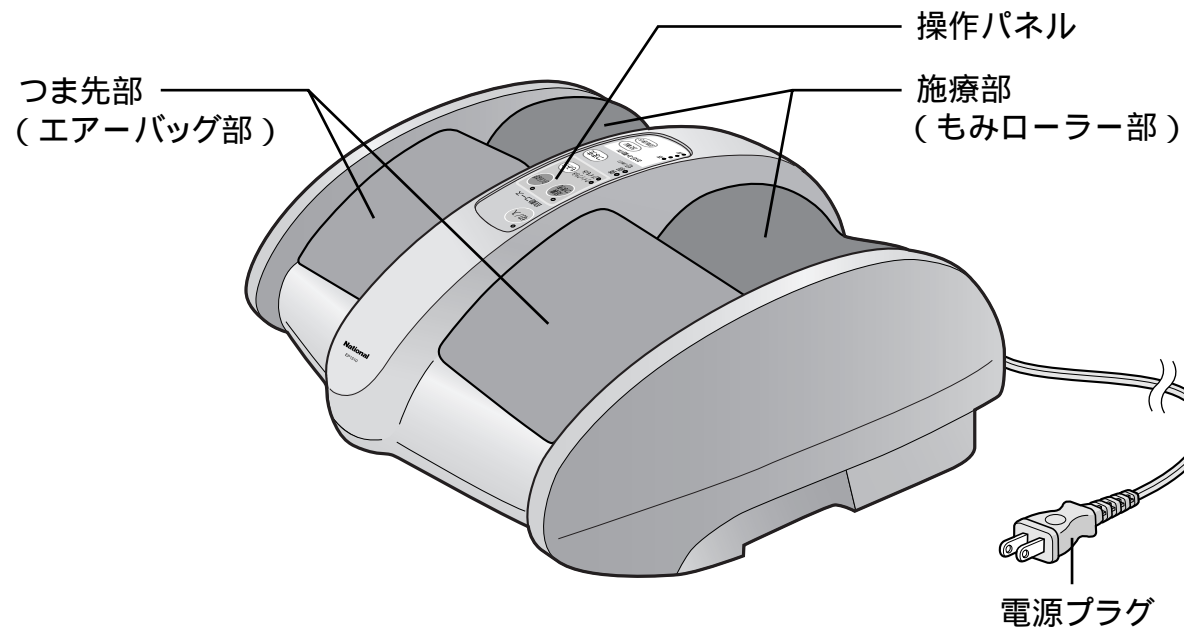

カバーについて

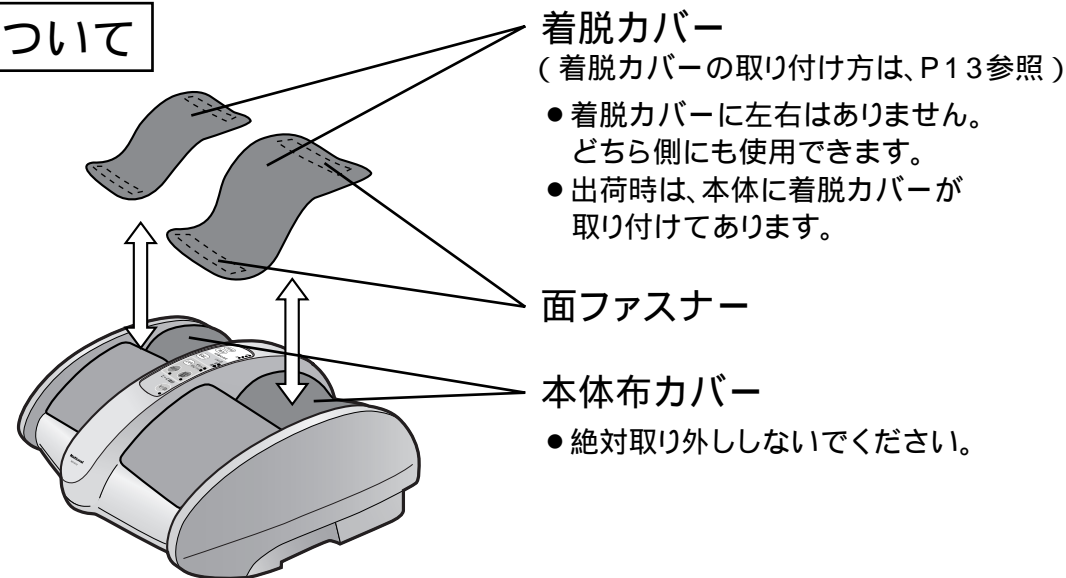


- 着脱カバー**
(着脱カバーの取り付け方は、P13参照)
- 着脱カバーに左右はありません。どちら側にも使用できます。
 - 出荷時は、本体に着脱カバーが取り付けられています。
- 面ファスナー**
- 本体布カバー**
- 絶対取り外ししないでください。

警告


- 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談の上使用する。
 - (1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
 - (2) 悪性腫瘍(しゅよう)のある人
 - (3) 心臓に障害のある人
 - (4) 妊娠中、出産直後の人
 - (5) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - (6) 骨粗しょう症の人、捻挫、肉離れなどの急性疼(とう)痛性疾患の人
 - (7) かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
 - (8) 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき。)
 - (9) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
 - (10) 脚部に重度の血行障害のある人
 - (11) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき
- 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

操作パネル

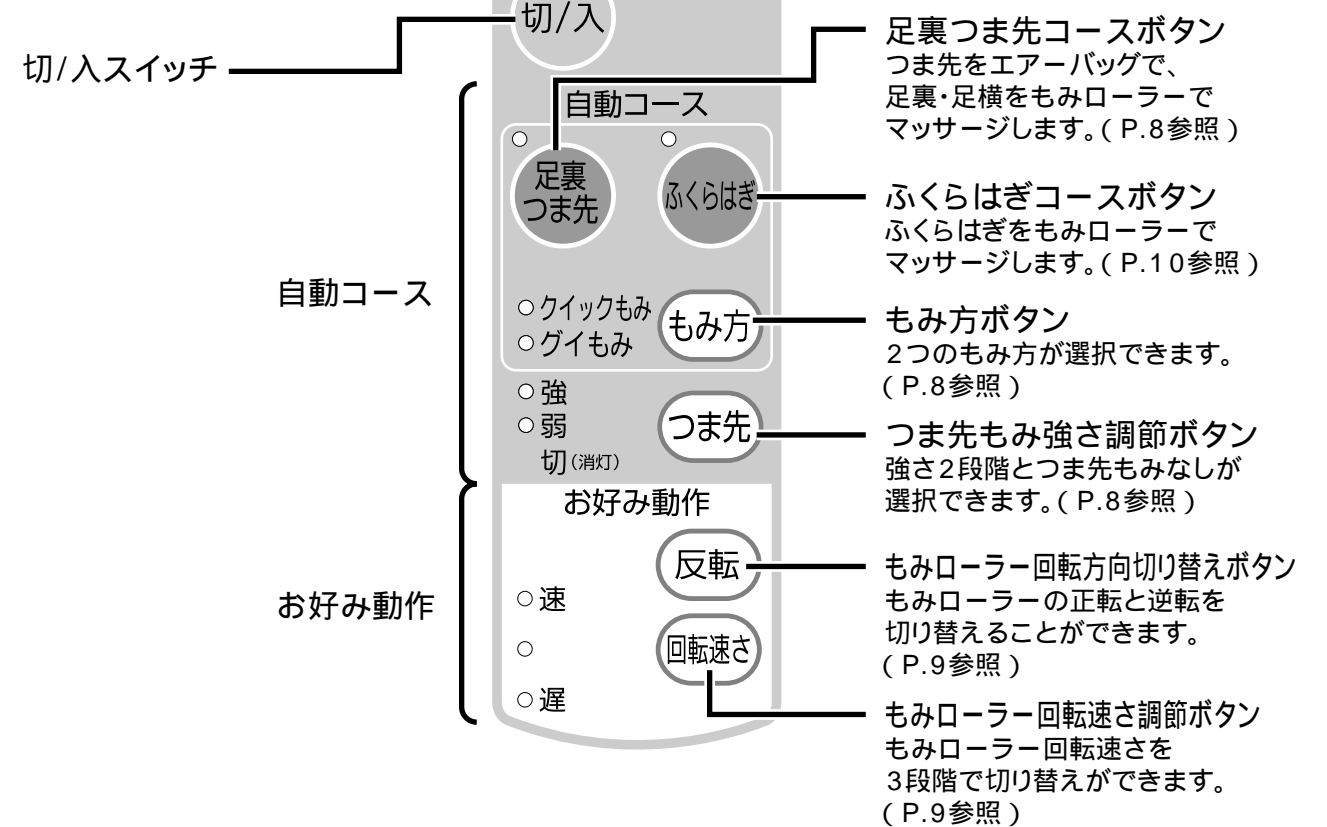

準備

- 電源プラグを差し込む(交流100Vのコンセント)
- 安定性のよい場所で使用する。

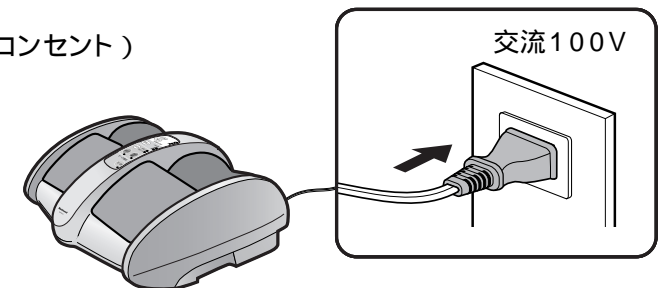

必ず着脱カバーを取り付けて使用してください。
(着脱カバーの取り付け方はP13参照)

お願い


- 本製品の近くで、携帯電話を使用しないでください。誤動作のおそれがあります。

警告


- 必ず交流100Vで使用する。守らないと火災や感電のおそれがあります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電やショート、発火、故障のおそれがあります。
- 変圧器を用いた使用はしない。火災や感電の原因になります。

足裏・つま先をマッサージする

1 つま先をつま先部に入れて、土踏まずをもみローラーの中央に置く

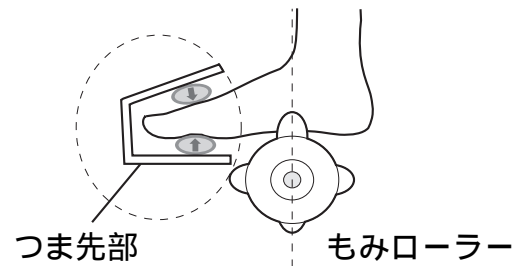

適用足サイズ
21.0 ~ 28.0cm

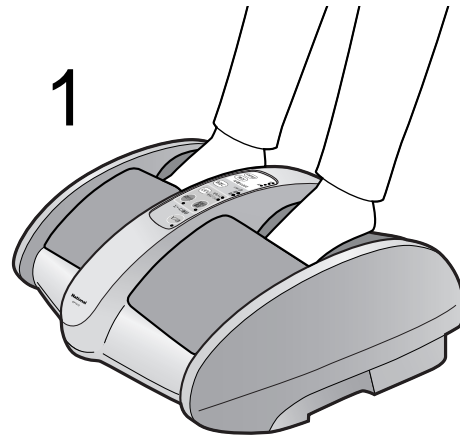

2 切/入 を押す


- 切/入表示ランプが点灯
- 自動コースの「足裏つま先コース」と「ふくらはぎコース」のランプが点滅

3 自動コースまたは、お好み動作の **回転速さ** を選ぶ

- 選択された動作表示ランプが点灯します。

警告

- 足またはふくらはぎのマッサージ以外の目的では使用しない。事故やけがのおそれがあります。
- お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせない。事故やけがのおそれがあります。
- 本体の上に立って使用しない。事故やけが、故障の原因になります。
- 本体布カバーや着脱カバーが破れた状態や内部構造が露出した状態、外れた状態では使用しない。(直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼する。) けがや感電の原因になります。
- 自分で意志表示ができない人に使わせない。また、自分で操作できない人への使用はさせない。事故やけがの原因になります。

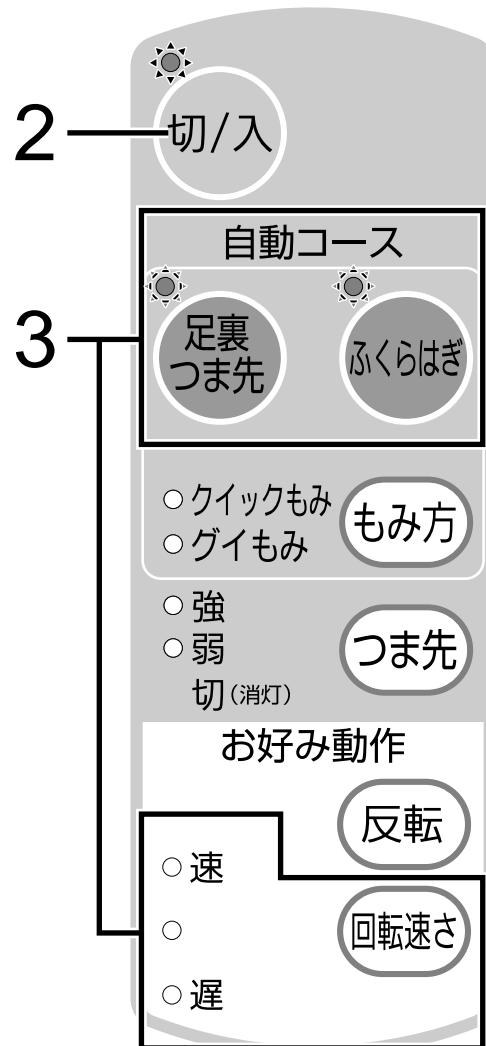

自動コースを使用する場合

足裏つま先 を押す


- つま先をエアバッグで、足裏・足横をもみローラーでマッサージします。

もみ方は「クイックもみ」、つま先は「弱」で始まります。



もみ方を変更したいとき **もみ方** を押す

- 繰り返し押し続けますともみ方を変更できます。

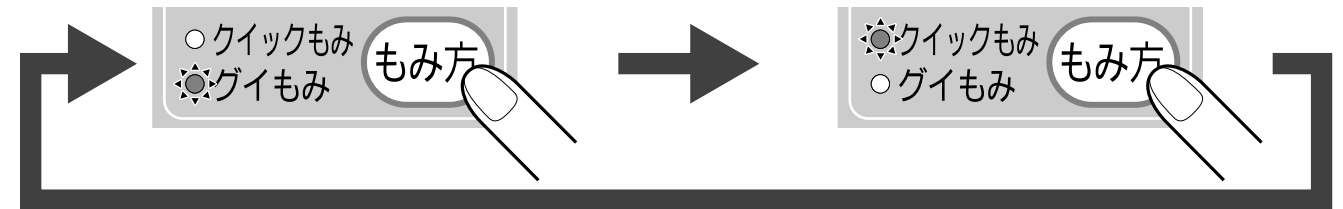

グイもみ ゆるやかに速さを切り替え、じっくりともまれる刺激が味わえます。

クイックもみ 小刻みに速さを切り替え、ギュギュッとまれる刺激が味わえます。

つま先もみ強さを变更したい・切りたいとき **つま先** を押す

- つま先もみ強さ調節ボタンを押すと強さが切り替わります。



- 表示ランプが消灯のときは、つま先もみは停止の状態です。(再度押し続けますとつま先もみが始まります)

お知らせ


障害物にあたるなど、ご使用中無理に力がかかった場合、安全のため全てのランプが点滅して動作が止まる場合があります。そのときは電源プラグを抜き約10秒後に再度電源プラグを差し込み電源を入れて操作してください。

足裏・つま先をマッサージする

お好み動作を使用する場合

回転速さ を押す

- 一定の速さで足裏・足横をもみローラーでマッサージします。
- 好みの速さになるまで繰り返し押ししてください。
3段階切り替わります。

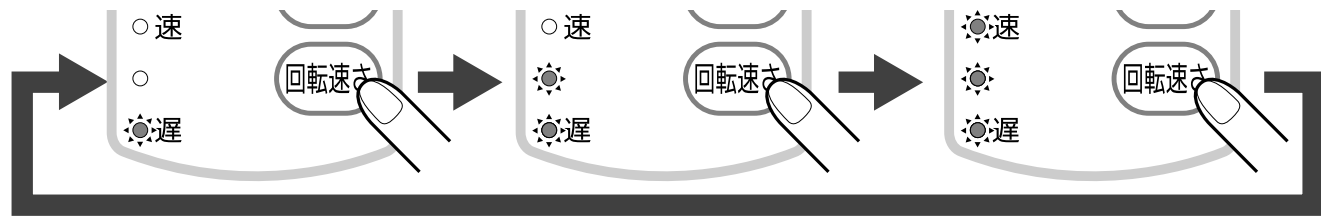

反転したいとき 反転 を押す

- 一度押すともみローラーが逆転(かかとからつま先へ回る方向)します。
- もう一度押すと正転(つま先からかかとへ回る方向)します。

4 マッサージ終了後、自動的に停止
所定のプログラムが終了すると自動的に停止します。(約15分)


途中で終了したいときは

切/入 を押す


- 全ての動作がその場で停止します。
- エアバッグの空気が抜けます。

このような使い方もできます


足の指のつけ根を
伸ばしながらかかとを
マッサージ

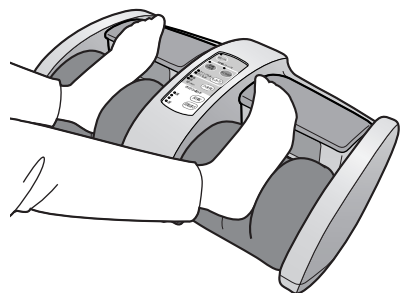

もみローラーのみで
足裏をマッサージ

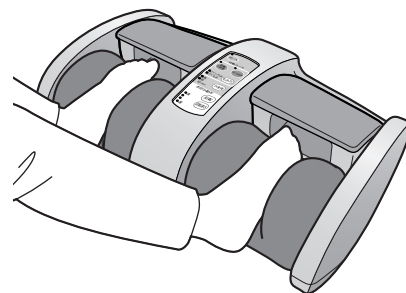


注意

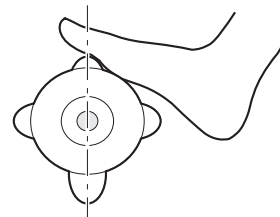

- もみローラー中央部より前側につま先を置いて足のマッサージをする。守らないとけがの原因になります。

ふくらはぎをマッサージする

1 本体の「つま先部」側から
ふくらはぎを置く

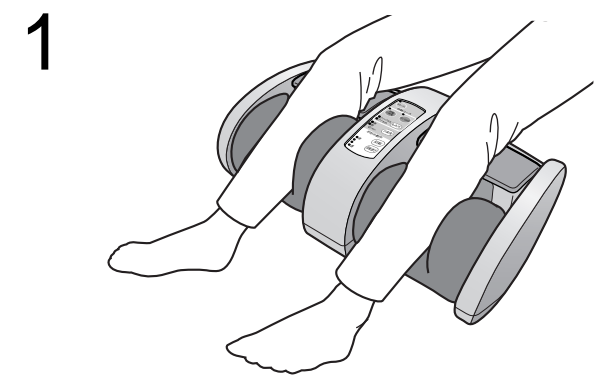


2 切/入 を押す

- 切/入ボタンランプが点灯
自動コースの「足裏つま先コース」と
「ふくらはぎコース」のランプが点滅


3 ふくらはぎ を押す

- 「ふくらはぎコース」のランプが点灯
- もみ方は「クイックもみ」で
始まります。

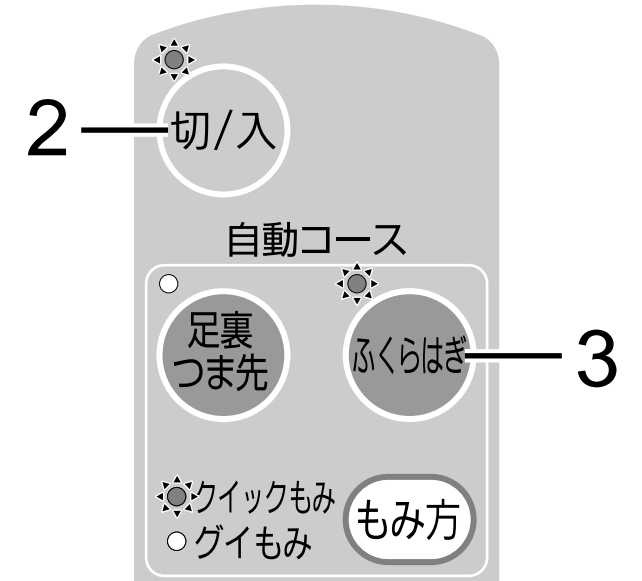

もみ方を変更したいとき もみ方 を押す

- 繰り返し押すともみ方を変更できます。

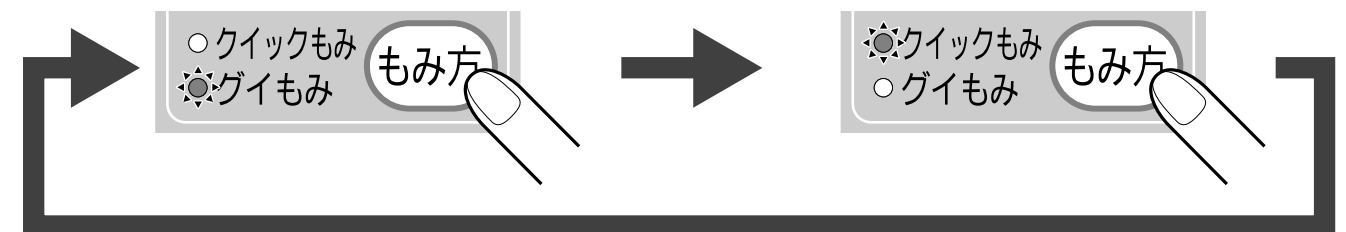

グイもみ

ゆるやかに速さを切り替え、
じっくりともまれる刺激が
味わえます。

クイックもみ

小刻みに速さを切り替え、
ギュギュッとともまれる刺激が
味わえます。

ふくらはぎをマッサージする


4 マッサージ終了後、自動的に停止
所定のプログラムが終了すると自動的に停止します。(約15分)

途中で終了したいときは

- 切/入 を押す
- 全ての動作がその場で停止します。

マッサージが終わったら

電源プラグを抜く

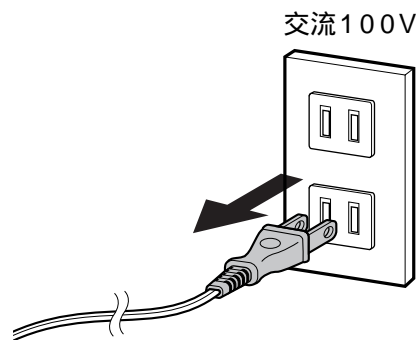


⚠ 注意

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って抜く。感電やショート、発火の原因になります。

お手入れのしかた

本体(プラスチック部分)


1. 石けん液を含ませた布をよく絞ってからふく。
2. 仕上げに水を含ませた布をよく絞ってからふく。
3. 自然乾燥させる。
 - シンナーやベンジン・アルコールは絶対に使用しない。変色したり割れが発生するおそれがあります。

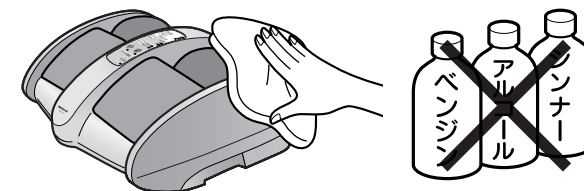

布地部分


着脱カバー

- 着脱カバーが汚れたら、取り外して洗濯してください。
 - 1. 本体から着脱カバーを外す。(P.13参照)
 - 2. 洗濯ネットに入れて中性洗剤を入れた洗濯機で洗います。
 - 3. 風通しの良いところで自然乾燥させて乾かしてください。(乾燥機のご使用はお避けください。)
- 洗剤は蛍光増白剤の入っていない洗剤をお使いください。生地が白く変色する場合があります。多少色落ちすることがありますので、他の物との洗濯はお避けください。つけ置き洗いはお避けください。

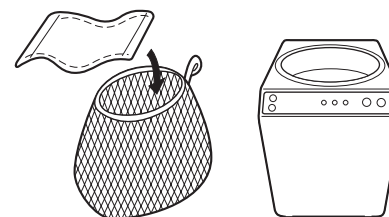

本体布カバー

1. 石けん液を含ませた布をよく絞ってからふく。
2. 仕上げに水を含ませた布をよく絞ってからふく。
3. 自然乾燥させる。

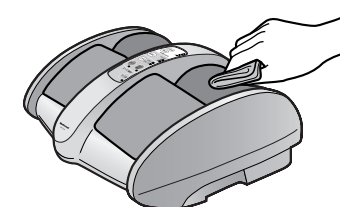


⚠ 注意


- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差ししない。感電やけどの原因になります。

保管

- 持ち運ぶときは両手で持って運んでください。指かかりが下にあります。

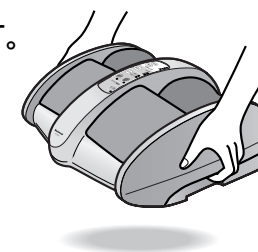

- 立てて保管しないでください。本体の構造上、故障するおそれがあります。

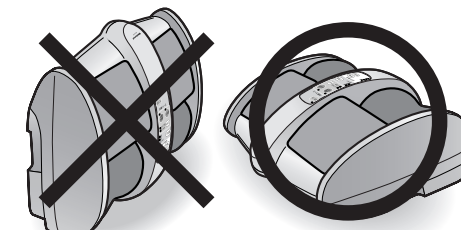


- 小さな子供の手の届くところに保管しない。

着脱カバーの取り付け方と外し方


● 出荷時は、本体に着脱カバーが取り付けられています。

取り付け方

1 つま先部を上上げる

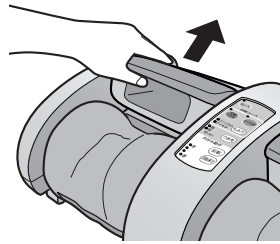


4 本体後部下の面ファスナーに貼り付ける

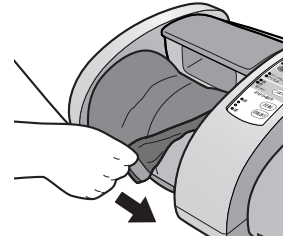

2 着脱カバーを面ファスナーに貼り付ける




5 逆側も取り付ける

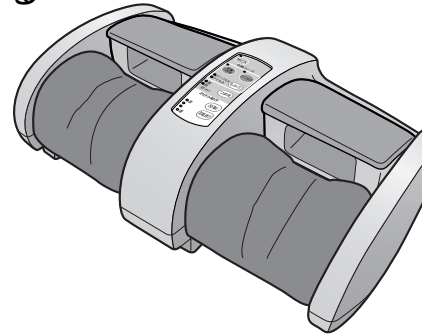


3 着脱カバーを手前に引っ張る

両サイドの溝部に、しっかりと着脱カバーを入れこんでください。

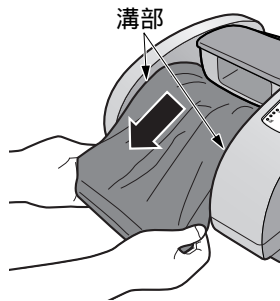


外し方


1 本体後部(手前)下の面ファスナーをはがす

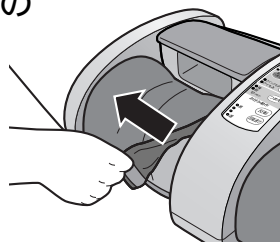


3 着脱カバーの面ファスナーをはがす

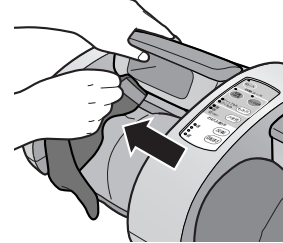

2 着脱カバーを持ちながらつま先部を上上げる

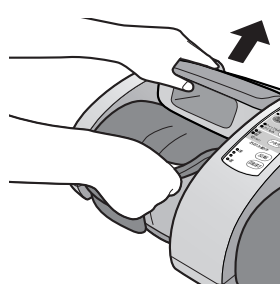

4 逆側も取り外す

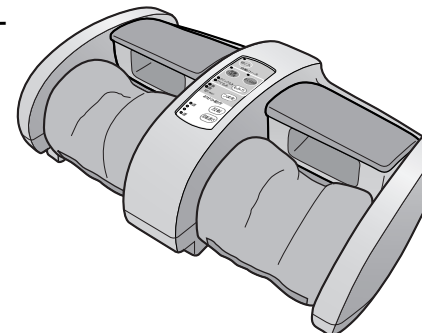

Q & A

Q.1

なぜ足がだるくなったり、重く感じたりするようになるのでしょうか？

A.1

血液は、心臓から動脈を通過して身体中に送られ、静脈を通過して心臓に戻ってきます。このとき足は身体の部位で最も心臓から遠い位置にあり、血液が届くのに時間がかかり、「だるい」「重い」といった症状が出やすくなると言われています。

Q.2

どの位の時間、使用すればいいの？

A.2

ご使用は1回15分以内に。長時間のご使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になることがありますのでご注意ください。

Q.3

1カ月の電気代はいくらですか？

A.3

1日30分(15分×2回)、毎日使用した場合で約4円/月です。(2005年7月現在当社調べ・1kW時22円で計算)

定格・仕様

販売名	フットサロン EP1510
使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	10W
類別	パイプレーターのうち家庭用電気マッサージ器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
医療用具許可番号	25BY0008
タイムー	約15分
本体寸法	幅598mm×奥行410mm×高さ216mm
質量	約10.0kg
定格時間	30分
輸入販売業者	松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地

愛情点検

長年ご使用のフットマッサージャーの点検をぜひ!



このようなことはありませんか?

- コードやプラグが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がある。
- スイッチを入れても、時々運転しないことがある。
- 本体が変形したり、こげくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、使用を中止しプラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

こんな異常を感じたら

症状

原因と処置

全てのランプが点滅して動作がとまった

異物をはさまったり、ご使用中無理な力を加えた場合、安全のため動作が止まる場合があります。そのときは電源プラグを抜き約10秒後に再度電源プラグを差し込み、電源を入れて操作してください。(P6~P7参照)

動かない

電源プラグが抜けていませんか
しっかり差し込んでください。(P6参照)

コードが断線していませんか

破損してしまった

点検後
異常がある

ただちに
使用を中止

お願い

このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

動作中発生する音について

ご使用中に下記のような動作音がありますが、構造上発生するもので異常ではありません。

- 回転方向が切り替わるときの音(カチツ音)
- 回転している音(シュルシュル音)
- 本体布カバー・着脱カバーのこすれる音(ギョツ音)
- つま先もみ中のエアが加圧する動作音(ブー音)
- つま先もみ中のエアが排気する音(シュー音、スー音)
- つま先部が動いた音(カタツ音)
- モーター音(ウォーン音、ウィーン音、スー音)



警告

絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのフットサロンの補修用性能部品の製造打ち切り後6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の16頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況(出来るだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずご購入の求めの販売店・工事店へお申し付けください。


・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  ハイ 365日
(全国共通番号) **0570-081-365**
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401  名古屋 ☎052-551-7900 
東京 ☎03-5392-7190  福岡 ☎092-622-0531 

ご注意 ・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話  ナナは 365日
ダイヤル  **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX  **0120-878-236**
ダイヤル 

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ)ご購入の販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)ご購入後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地