


本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報は本書裏面に記載してあります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW-KA30	様
保証期間	1年間 (ただし、消耗品は除く)	様
※お買い上げ日	年 月 日	様
※お名前	様	様
※住所	様	様
※お名前	様	様
※電話	様	様
※住所・販売店名	様	様
※電話	様	様

パナソニック株式会社
ヒューテック・リビング・ビジネスユニット
〒322-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890
ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

もくじ

安全上のご注意 2・3
各部のなまえ 4
電池の入れ方 5・6
給水のしかた 7
使いかた 8
お願い 9
使い終わったら 10
お手入れ 11
廃棄について 11
Q&A 12
故障を防ぐために 12
故障かな?と思ったとき 13
定格・仕様 20

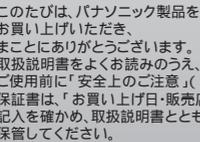

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」(2-3ページ)を必ずお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保管用

保証書付き

2012年1月1日(新版様式第1版)
W9030KA302 S0910-1012
Printed in Japan

安全上のご注意 - 必ずお守りください -

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

❌ してはいけない内容です。 ⚠️ 実行しなければならぬ内容です。

警告	呼吸器に疾患のある人、耳鼻咽喉に疾患のある人、ゼンソクの人、または医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているときは必ず医師と相談のうえ使用する。守らないと体調不良をおこすおそれがあります。
必ず守る	自分で意思表示できない人または、自分で操作できない人には使用させない、ケガをするおそれがあります。
禁止	不安定な場所に置いたり保管しない。また、給水タンクに水を入れて持ち運びしない。事故や水漏れ、故障の原因になります。
水場使用禁止	ノズル穴やすき間にピンや針金などの金属物等、異物をいれない。異常動作してケガをするおそれがあります。
分解禁止	絶対に分解したり修理・改造は行わない。事故やトラブル、故障のおそれがあります。

注意

のどや鼻に異常を感じた場合や気分が悪くなるなどの異常を感じたときには直ちに使用を中止し、医師に相談する。守らないと体調不良をおこすおそれがあります。

必ず守る 吸入に使用する水は常に新しい水道水を使用し、常に機器を清潔にして使用する。守らないとカビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因になります。

必ず守る 必ず毎回新しい水道水を使用し、使用前に新しい水が出るまで5秒間噴霧させてから使用する。また、給水タンクの残水は必ずする。守らないとカビや雑菌が繁殖し、体調不良をおこすおそれがあります。

必ず守る お湯(40以上)は使用しない。守らないと事故や故障のおそれがあります。

禁止 薬剤・薬液・食塩水・重曹水は使用しない。守らないと体調不良や故障のおそれがあります。

禁止 お子様のご使用の際は、大人の方が付き添い目を離さない。守らないと事故やケガ、体調不良をおこすおそれがあります。

禁止 吸入以外の目的で使用しない。事故やトラブル、故障の原因になります。

禁止 ほこり、ちり、湿気が多い場所での使用や保管はしない。故障の原因になります。


禁止 他の治療器と同時に使用しない。事故や体調をくずすおそれがあります。

禁止 電池・電池プタ・掃除針キャップは、幼児の手の届く所に置いたり保管したりしない。万一口飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。事故のおそれがあります。

禁止 ノズル穴をのぞいたり、目などを近づけない。ケガをするおそれがあります。

接触禁止


各部のなまえ

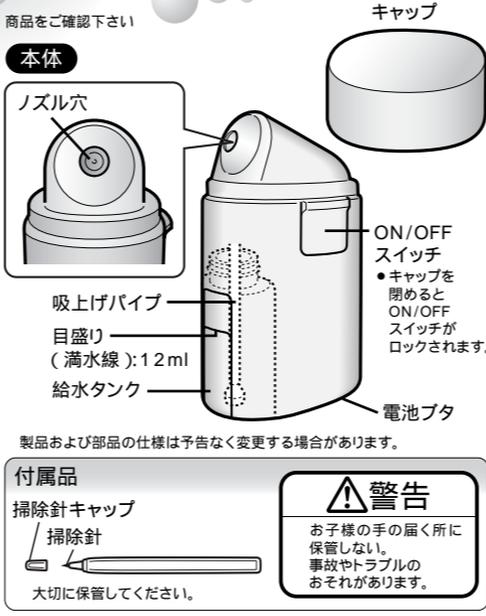

商品をご確認下さい

効能・効果 咽喉の加温、洗浄により不快感の改善。

電池の入れ方

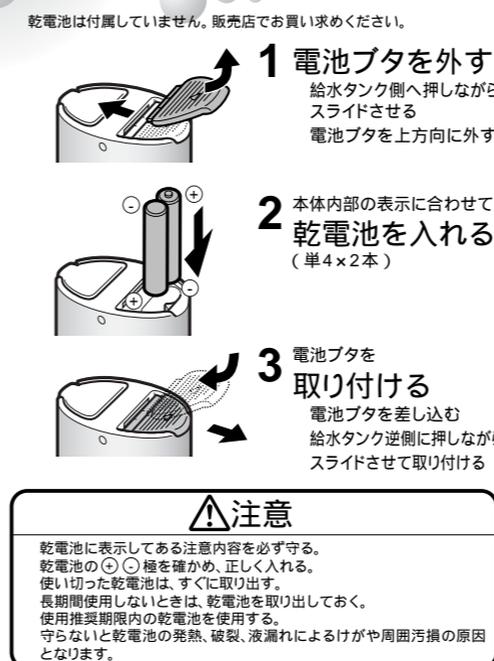

乾電池は付属していません。販売店でお買い求めください。

乾電池について パナソニックアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。(単4形乾電池LR03×2本) マンガン乾電池、オキシライド乾電池、充電式乾電池も使用できます。

アルカリ乾電池以外の乾電池を使用すると、電池の種類によっては寿命が短くなる場合があります。室温が低いと乾電池の寿命が短くなる場合があります。


パナソニックアルカリ乾電池(単4形乾電池LR03)×2本で約90回使用できます。(1回に1分間使用) 噴霧力が弱まってきたときは、2本同時に新しい乾電池に取り替えてください。

長期間(約3ヶ月以上)使用しない場合や、消耗した電池は必ず外してください。

乾電池は必ず1年に1回お取り換えください。取り換えがおくれますと、漏液により故障するおそれがあります。


使いかた

のどの乾燥による不快感がある場合ご使用ください。

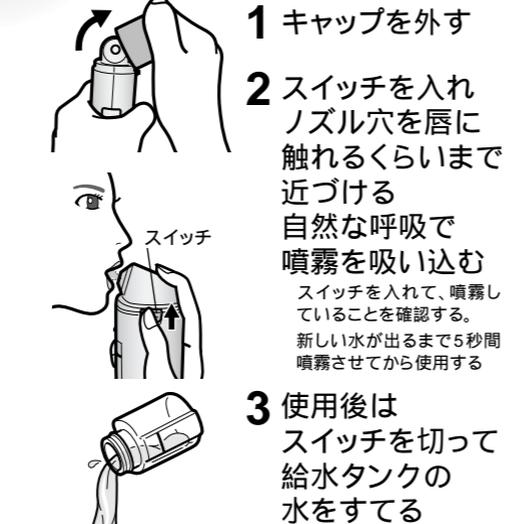


のどに潤いを感じられる時間(1回1-2分間程度)がご使用の目安です。1分間の噴霧で、約3回使用できます。多少の傾きでも使用できますが、逆さまにすると噴霧しません。

お願い

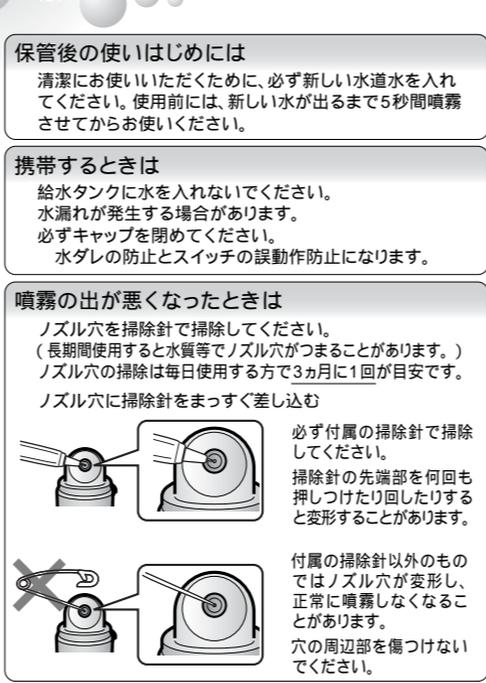


必ず付属の掃除針で掃除してください。掃除針の先端部を何回も押しついたり回したりすると変形することがあります。

使い終わったら

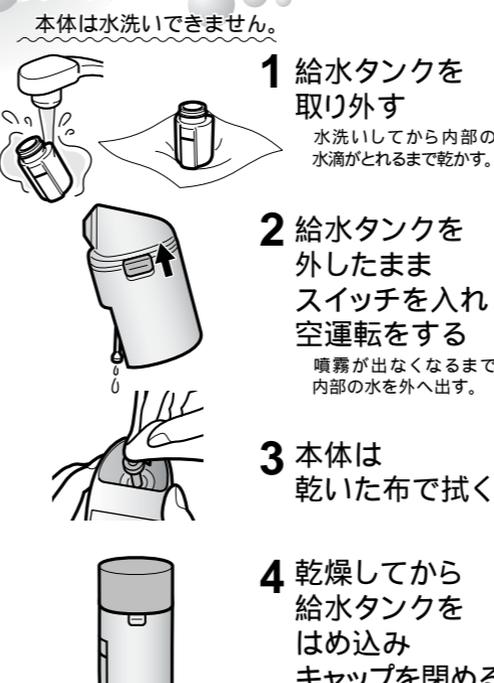

本体は水洗いできません。

電池の入れ方(つづき)

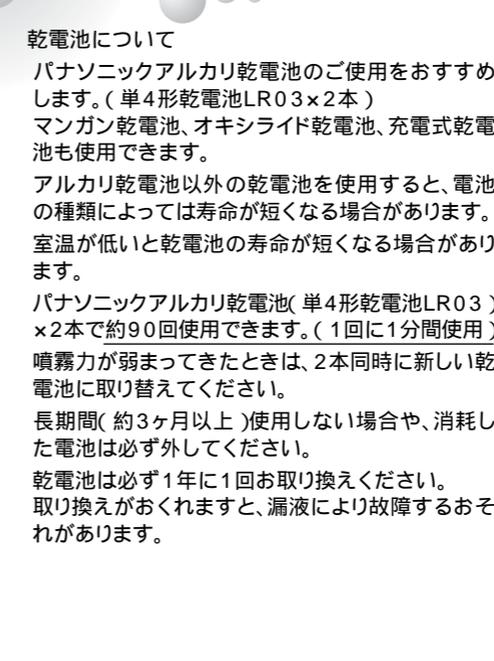

乾電池について パナソニックアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。(単4形乾電池LR03×2本) マンガン乾電池、オキシライド乾電池、充電式乾電池も使用できます。


アルカリ乾電池以外の乾電池を使用すると、電池の種類によっては寿命が短くなる場合があります。室温が低いと乾電池の寿命が短くなる場合があります。

パナソニックアルカリ乾電池(単4形乾電池LR03)×2本で約90回使用できます。(1回に1分間使用) 噴霧力が弱まってきたときは、2本同時に新しい乾電池に取り替えてください。

長期間(約3ヶ月以上)使用しない場合や、消耗した電池は必ず外してください。

乾電池は必ず1年に1回お取り換えください。取り換えがおくれますと、漏液により故障するおそれがあります。

給水のしかた

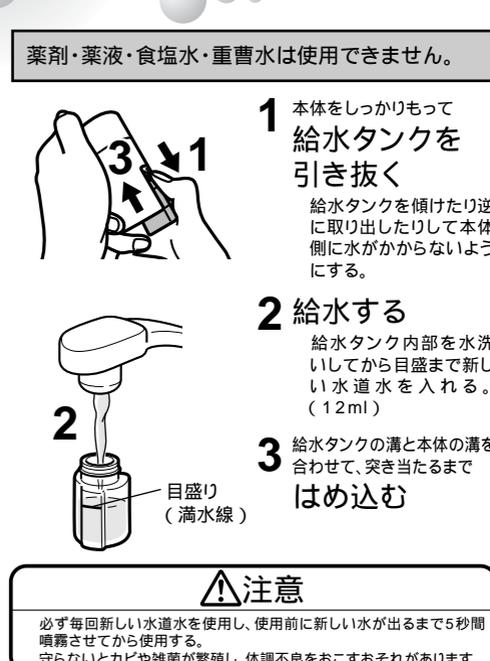

必ず毎回新しい水道水を使用し、使用前に新しい水が出るまで5秒間噴霧させてから使用する。守らないとカビや雑菌が繁殖し、体調不良をおこすおそれがあります。

お手入れ



本体の汚れはぬるま湯を含ませた布でふく。

Q&A

Q.1 薬は使えますか?
A.1 故障の原因となるため、新しい水道水以外使用しないでください。体調不良やノズル穴つまり・材料劣化等のトラブルが発生するおそれがあります。

Q.2 市販のペットボトルの水や井戸水は使えるの?
A.2 故障の原因となるため、使用しないでください。毎回新しい水道水を使用してください。ミネラル分の多い水の場合、ノズル穴がつかまるおそれがあります。



落としたりしないでください。浴室で使用しないでください。

