

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。



❗記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



必ず守る

- ゼンソクの人、または医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているときは必ず医師と相談のうえ使用する。守らないと体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

- 自分で意思表示できない人には使用させない。また、お子様や自分で温度調節・操作できない人だけでは使用させない。感電やヤケドをおこすおそれがあります。

- スチーム噴出口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。感電や異常動作してケガをするおそれがあります。

- 不安定な場所や子供の手の届く所には置かない。また、使用中や使用直後に傾けたり、持ち運んだり、お手入れしない。熱湯がこぼれたり高温部に触れたりして、ヤケドの原因になります。



水場使用禁止

- 本体を水につけたり、水をかけたり水洗いしない。ショート・感電のおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に分解したり修理・改造は行わない。発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。



電源プラグを抜く

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。感電やケガをするおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。感電のおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

- のどや鼻に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談する。
守らないと体調不良をおこすおそれがあります。
- 吸入に使用する水は常に新しい水道水を使用し、常に機器を清潔にして使用する。
守らないとカビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因になります。
- 必ず新しい水道水を使用し、薬剤・薬液は使用しない。
守らないと体調不良や目づまり・材料劣化による故障のおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
守らないと感電・ショート・発火のおそれがあります。
- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと火災・感電のおそれがあります。



禁止

- 使用中に熱いと感じたら直ちに使用を中止する。
ヤケドをするおそれがあります。
- ボイラー内には水道水以外は入れない。
発火やヤケドをするおそれがあります。
- スチーム噴出口以外からスチームがもれる場合は、直ちに使用を中止する。
高温蒸気に触れ、ヤケドをするおそれがあります。
- 給排水カップの給水側に水がない状態で、噴霧しない。
ヤケドをするおそれがあります。
- 吸入以外の目的で使用しない。
ヤケドや体調不良の原因になります。
- 使用中のお手入れや給水はしない。
お手入れや給水は本体が十分さめてから行う。
高温蒸気に触れ、ヤケドをするおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

- ボイラータンクに30mL以上水を入れない。
ヤケドをするおそれがあります。
- ほこり、ちり、湿気の多い場所での使用や保管はしない。
感電および故障の原因になります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものを載せたり、挟みこんだりしない。
発火・感電のおそれがあります。
- 他の治療器と同時に使用しない。
事故や体調をくずすおそれがあります。



接触禁止


- スチーム噴出口に触ったり、のぞいたり、目などを近づけない。
またボイラーキャップは確実に閉める。
ヤケドの原因になります。
- ボイラーキャップを開けた状態での空だき時は、顔や手を近づけない。
また、5分以上空だきしない。
ヤケドをするおそれがあります。




電源プラグを抜く

- 使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。


各部のなまえ

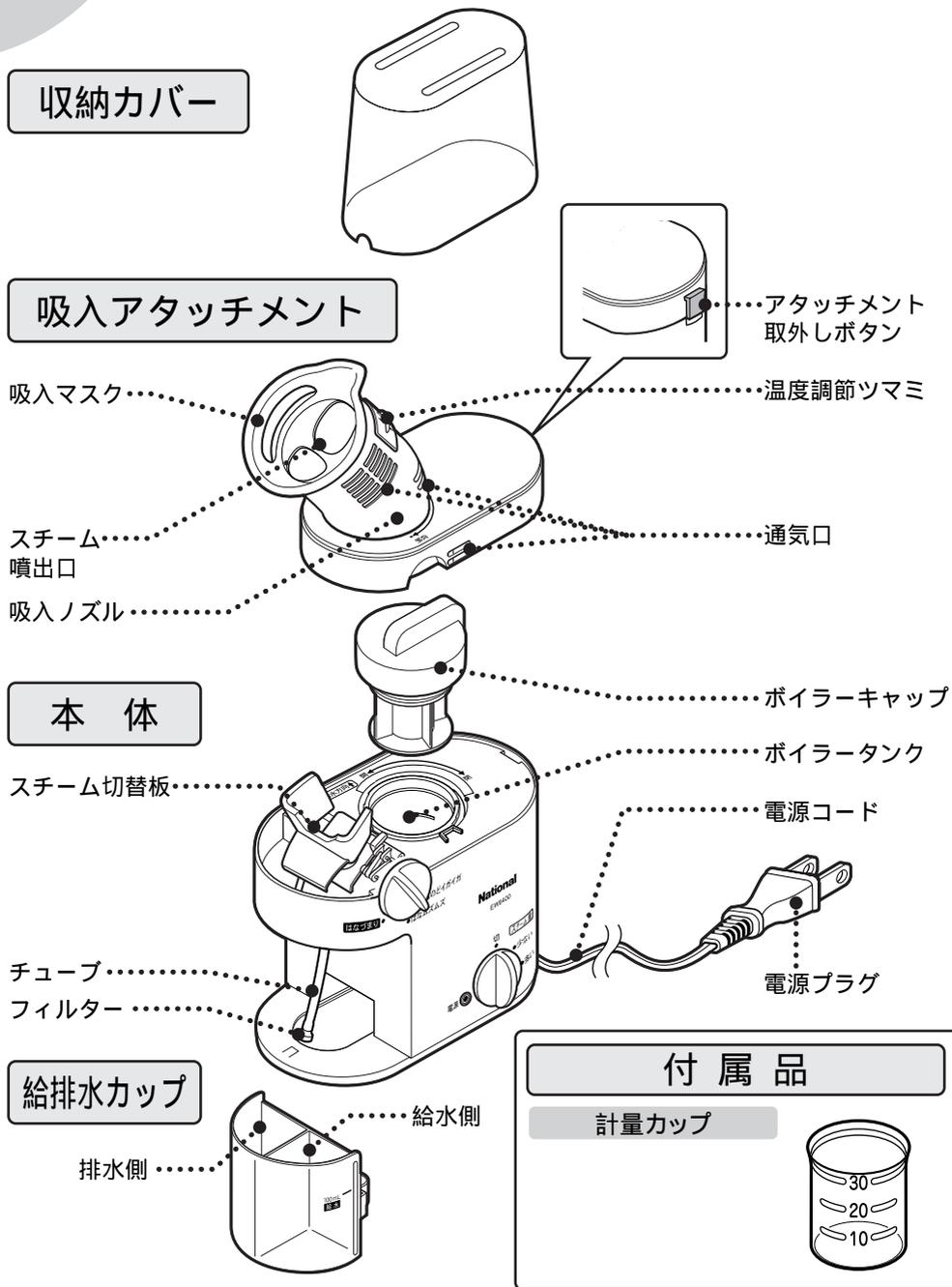



本体正面

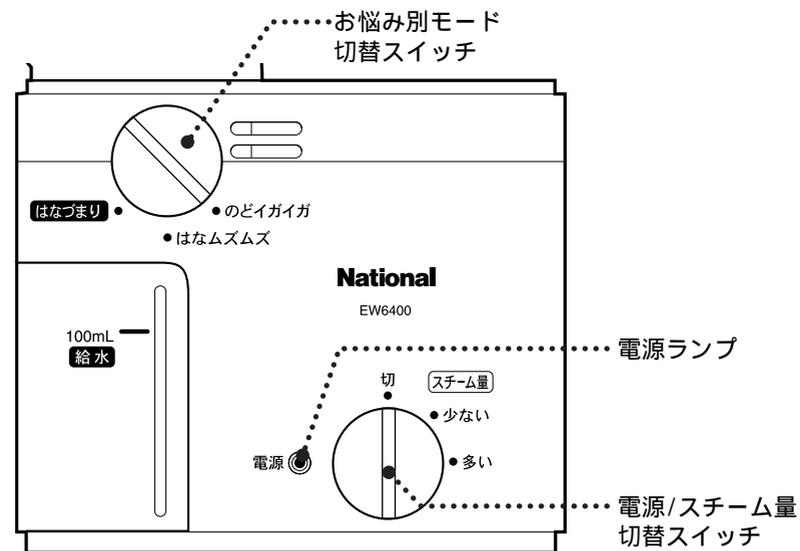

吸入アタッチメント上面

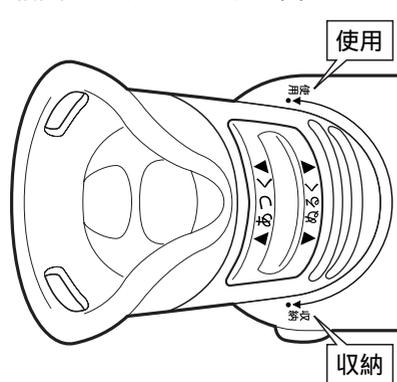

本体上面

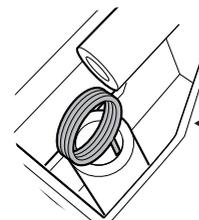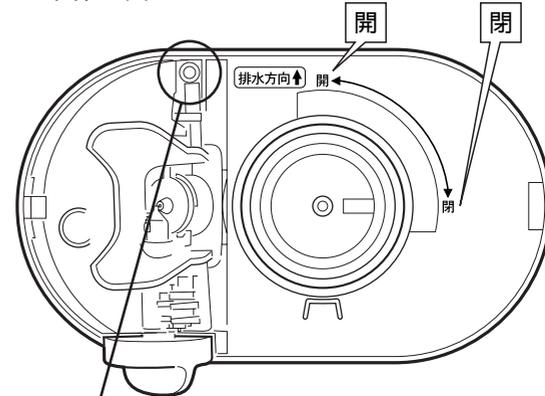

スチーム噴出穴掃除針

- 本体上面に差し込んでいます。

各部のなまえ


準備

本体は水平なところに置く。

- 必ず本体がさめていることを確かめてから使用してください。

警告

- 不安定な場所や子供の手の届く所には置かない。
また、使用中や使用直後に傾けたり、持ち運んだり、お手入れしない。
熱湯がこぼれたり高温部に触れたりして、ヤケドの原因になります。

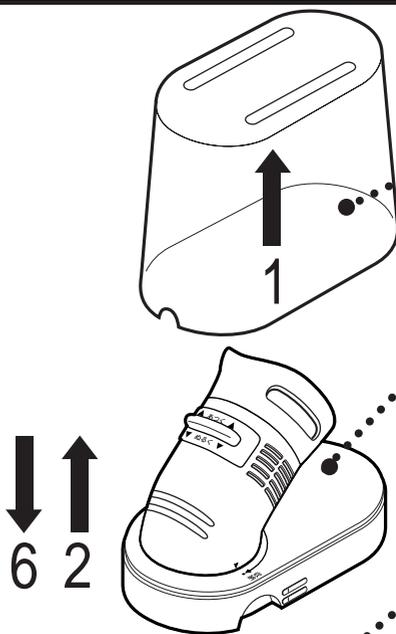

1 収納カバーをはずす

2 吸入アタッチメントをはずす

3 ボイラーキャップをはずす

4 計量カップでボイラータンクに30mLの水道水を入れる

- 水量は水平なところでお測りください。
- スチーム量が「少ない」のとき約10分「多い」のとき約7分吸入できます。
- 水道の蛇口から直接給水しないでください。
- ボイラータンクに30mL以上水を入れないでください。
- 必ず新しい水道水を使用し、薬液・薬剤は使用しないでください。

5 ボイラーキャップを確実に閉める


- ボイラーキャップは「閉」の位置まで確実に閉めてください。

6 吸入アタッチメントを取り付ける


- フックを本体に合わせ取り付ける
- ボイラーキャップを確実に閉めていないと、吸入アタッチメントは装着できません。



ボイラータンクに30mL以上水を入れないでください。

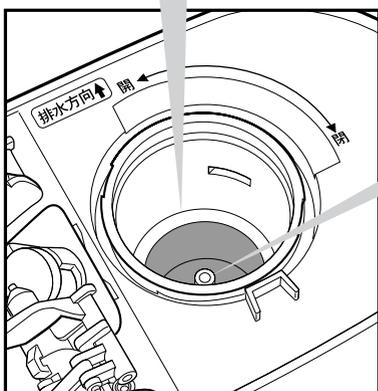

ボイラータンク内の穴に水が入らないように給水してください。

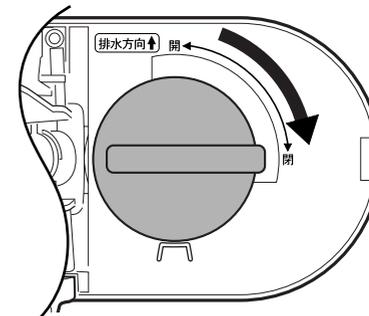


- 本体内部(ボイラータンク、チューブ等)に水滴が付着していることがありますが、これは、当社にて噴霧テストを行った蒸留水が残っているもので、衛生上問題はありません。

準備

7 給排水カップを取り外し、給水側に100mLの水道水を入れ、セットする

- 水量は水平なところでお測りください。
- 運ぶときと取りはずすときは、こぼさないように気をつけてください。
- セットしやすいように、給排水カップと本体には少し隙間をあけております。
- 食塩水や重曹水は使用しないでください。
- 必ず新しい水道水を使用し、薬液・薬剤は使用しないでください。
- お湯は使用しないでください。

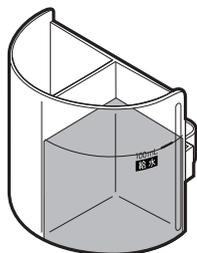

8 吸入ノズルを回して「」を「使用」の位置まで確実に合わせ

- 合わせないとスチーム量が少なくなるおそれがあります。


9 高さが低い場合は収納カバーを台にしてください

- 本体を収納カバーにのせるときには、必ず本体部分を両手でしっかりと持ってください。
- 本体がぐらついたりしないよう収納カバーに本体を隙間なく入れてください。
- 収納カバーを台にして使用する場合は本体に手をそえて倒れないようにしてください。
- 通気口をふさがないでください。


10 電源プラグを差し込む

警告

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。感電のおそれがあります。

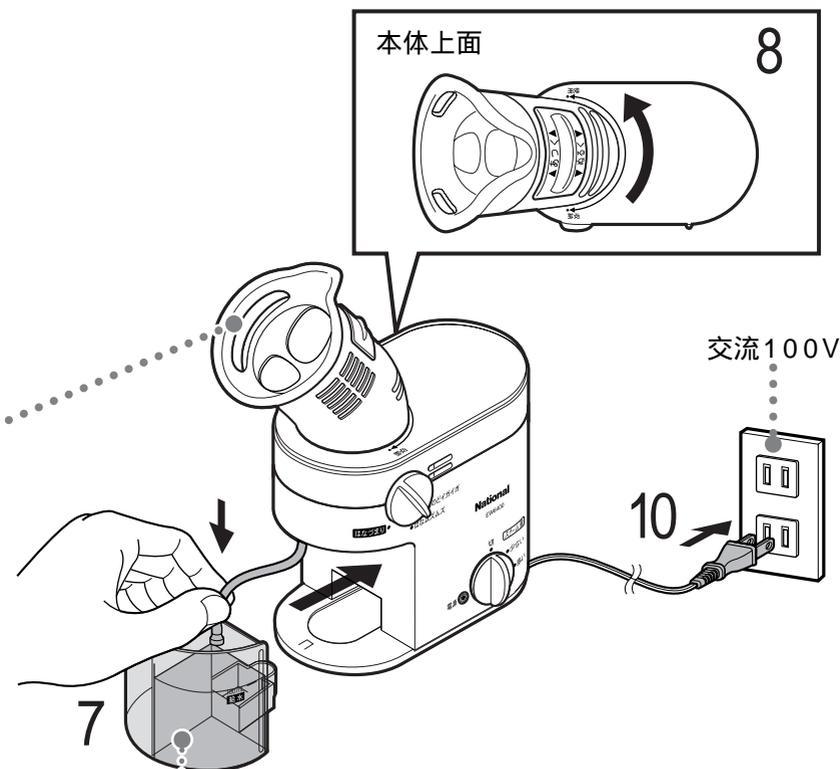


チューブが折れないように指で持ち、給排水カップ(給水側)の中へ入れてから、本体にセットする チューブは無理に引っ張らない。

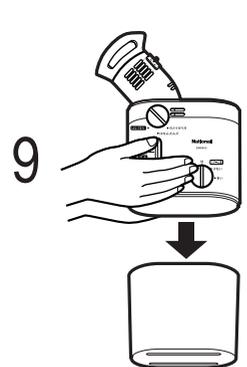

準備

使いかた

衣類が濡れることがありますのでタオルなどを胸に当ててください。

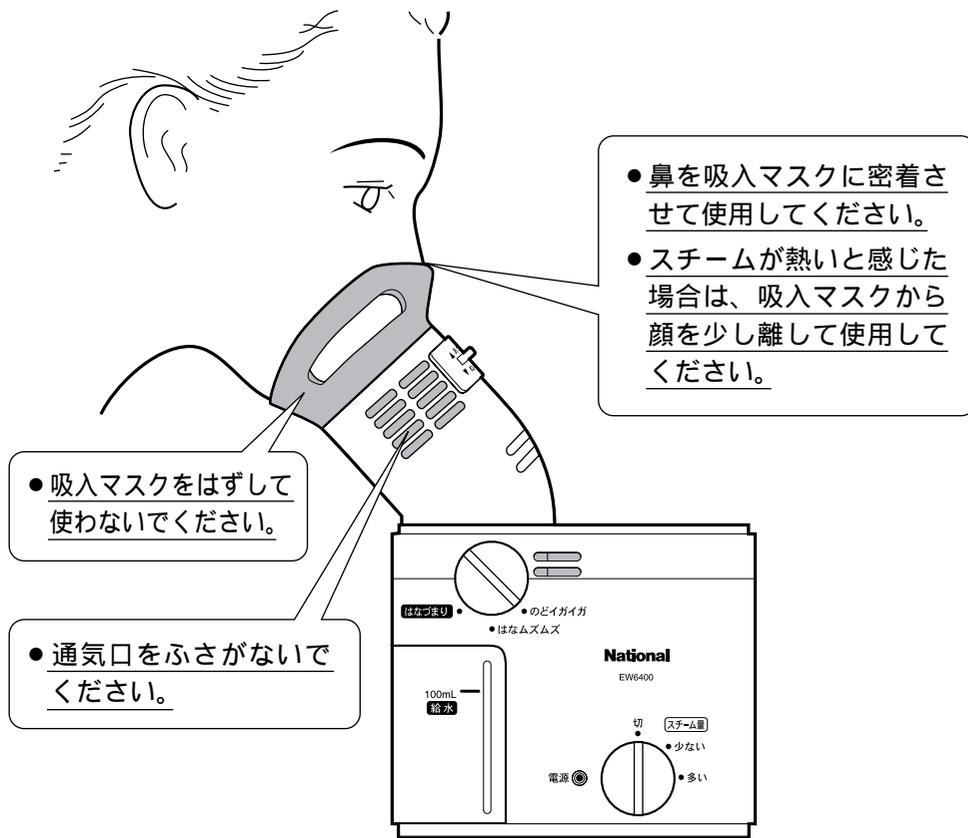


警告

- スチーム噴出口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物をいれない。感電や異常動作してケガをするおそれがあります。


- のどや鼻に異常を感じたり、使用中に熱いと感じたら直ちに使用を中止してください。
- スチーム噴出口に触ったり、のぞいたり、目などを近づけないでください。
- スチーム噴出口以外からスチームがもれる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中、製品に異常を感じたり、停電になったときはすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。

1 温度調節つまみを「ぬるく」にする

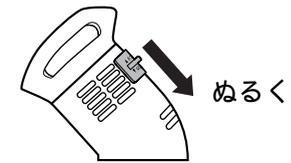

2 お悩み別モード切替スイッチで「はなづまり」、「はなムズムズ」、「のどイガイガ」を選択する

- はなづまりモードは、給水側の水をほとんど使用しません。また、噴霧音が大きくなる場合がありますが異常ではありません。

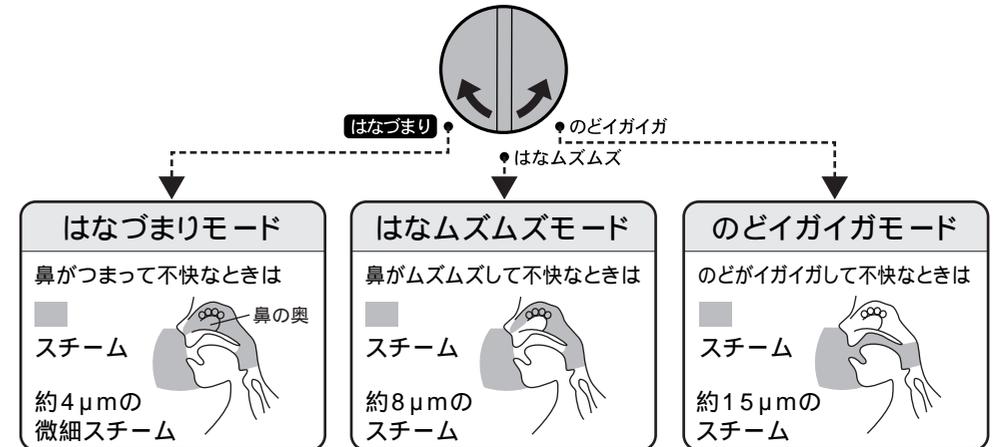

3 電源 / スチーム量切替スイッチを右に回して、電源を入れる


- 電源ランプの点灯を確認してください。
- 「少ない」の場合は約80秒後に噴霧がはじまり、「多い」の場合は約60秒後に噴霧がはじまります。

電源切り忘れ防止機能について

- 本機は電源を切り忘れた場合、安全のため内部電源が切れます。スチームが出なくなってからも約2分間以上電源をつけたままにした。空だきを約5分以上した。(ただし、電源ランプは点灯したままです。)
- 電源切り忘れ防止機能が働いた場合 電源 / スチーム量切替スイッチを「切」にして約30分以上本体を冷ましてから、使用してください。(本体が冷めるまでスチームを噴霧しませんが、故障ではありません。)

使いかた


4 吸入する

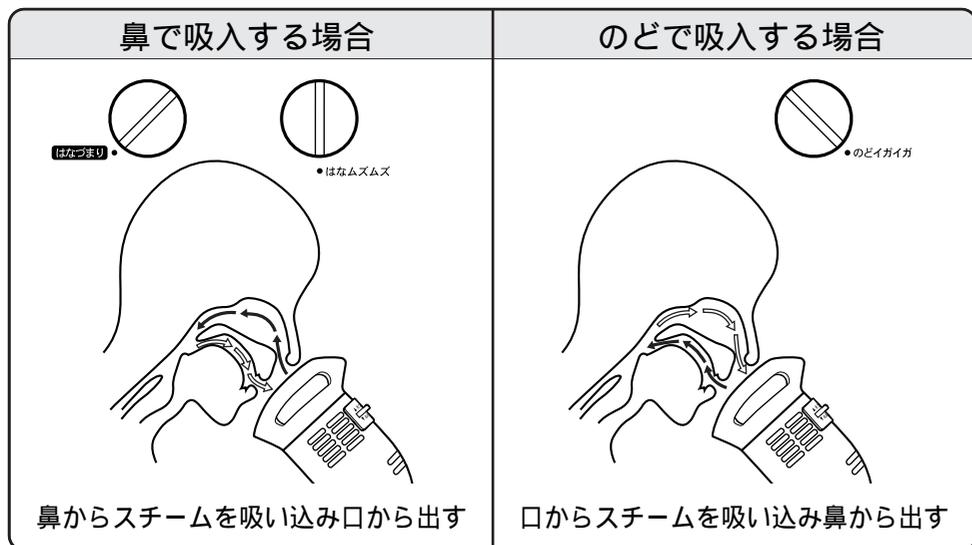

●使用後は給排水カップの排水側に水がたまりませんが異常ではありません。

5 電源 / スチーム量切替スイッチでスチーム量を選択する

- 吸入時にむせる場合は、スチーム量を「少ない」にして使用してください。
- 「少ない」のときは約10分間スチームを噴霧します。
- 「多い」のときは約7分間スチームを噴霧します。

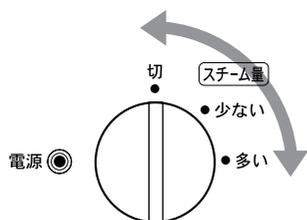


6 温度調節つまみでスチーム温度を調節する

- 慣れるまでは熱いと感じることがありますので、「ぬるく」で使用してください。
- 温度を調整しても熱く感じるときは顔を少し離して使用してください。
- スチームが出なくなったら吸入終了です。すぐに電源を切ってください。(お手入れはP.16参照)



7 電源 / スチーム量切替スイッチを「切」にして電源を切る

- 電源ランプの消灯を確認してください。
- 収納カバーを台にして使用した場合は本体をおろしてください。
- 本体から「プツプツ」音がすることがありますが異常ではありません。
- 給水側に水が残る場合がありますが異常ではありません。

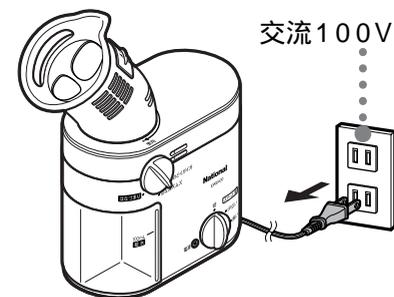

8 電源プラグを抜く


9 本体がさめるまで10分以上待つ

- 続けて使用する場合は、本体がさめていることを確かめてから使用してください。

10 給排水カップの水を捨てる

11 吸入アタッチメントとボイラーキャップをはずしてボイラータンクの水を捨てる

- 電源 / スチーム量切替スイッチに水がかからないよう、「排水方向↑」の表示側に合わせて水を捨ててください。

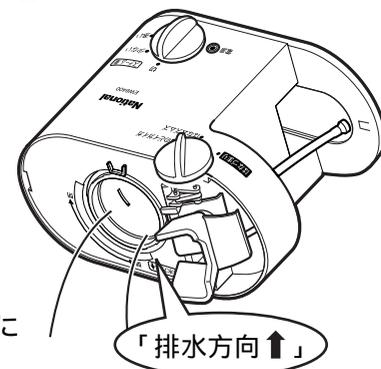

警告

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。感電やケガをするおそれがあります。
- 本体を水につけたり、水をかけたり水洗いしない。ショート・感電のおそれがあります。

使いかた

上手な吸入のしかた

●お悩み別モード切替についてはP.12参照。

こんなとき

かぜの気になるとき	鼻
	のど
	鼻とのど
花粉の気になる季節には鼻がムズムズする	
タバコのすすぎのどを使いすぎには...のどがイガイガする	
鼻がつまる	

おすすめモードと吸入時間


●スチーム量「多い」のとき(吸入時間:約7分)

はなづまりモード	はなムズムズモード	のどイガイガモード
2分	4分	1分
1分	2分	4分
2分	2分	3分
2分	5分	
5分	2分	7分


使用上のご注意

本体を持ち運ぶときは...


- 必ず本体部分を両手でしっかりと持ってください。

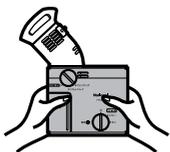

- 吸入アタッチメントや収納カバーを持って持ち運びしないでください。本体がはずれて落下し、破損するおそれがあります。

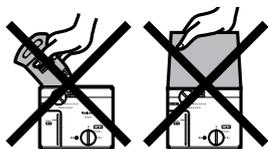

吸入ノズルがはずれたときは...

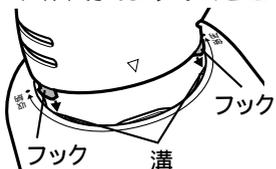

図のように、吸入ノズルのフック2ヶ所を、吸入アタッチメントの溝に合せて奥まで挿入し、吸入ノズルを回転させてください。

お手入れ


1 本体の汚れは布でふきとり、本体以外の部品は水洗いする

布でふきとる部品	水洗いできる部品
<p>●汚れがひどいときは石ケン液を含ませた布でふく。 ●隙間の汚れはブラシなどを使って汚れをとる。</p> <p>本体</p> <p>●熱湯、シンナー、ベンジン、アルコール(台所用除菌剤等)等は絶対に使用しない。 ●器具に、衝撃を与えたり、手荒に扱ったりしない。</p>	<p>吸入マスク ポイラーキャップ 給排水カップ</p> <p>吸入アタッチメント 収納カバー 計量カップ</p> <p>●必ず水洗いをしてください。 <u>煮沸消毒はできません。</u></p>

2 水洗いをした部品を乾燥する

スチームの出が悪くなら

- スチーム噴出穴をスチーム噴出穴掃除針で掃除する。(長期間使用すると水質等でスチーム噴出穴がつまることがあります。)
- スチーム噴出穴の掃除は、毎日使用する方で、1ヵ月に1回が目安です。

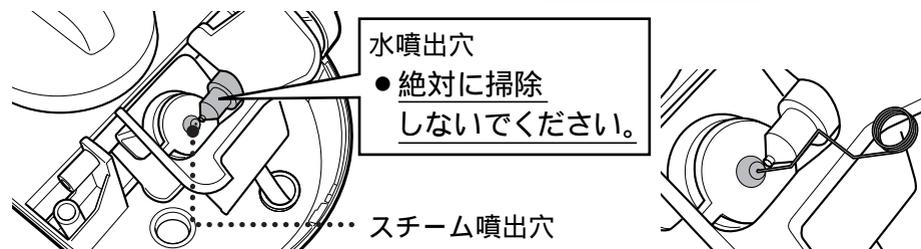

- 必ず本体がさめてから行う。
- 付属のスチーム噴出穴掃除針以外は使わない。
- 穴の周辺部やチューブなどをスチーム噴出穴掃除針で傷つけない。

お手入れ

保管するときは

- 乾燥したことを確かめてから保管してください。

1 ボイラーキャップ・
吸入アタッチメント・
吸入マスク・給排水カップを
本体に取り付ける

2 吸入ノズルを回して
「 」を「収納」の位置まで
確実にあわす

- あわさないと収納カバーが閉まらなくなります。

3 収納カバーを付け保管する

- 水平なところへ保管してください。



⚠警告

- 不安定な場所や子供の手の届く所には置かない。
また、使用中や使用直後に傾けたり、持ち運んだり、お手入れしない。
熱湯がこぼれたり高温部に触れたりして、ヤケドの原因になります。

長期間使わない場合は

- ボイラーキャップを開けたまま約2分間電源を入れ、空だきして乾燥させる。
- 10分以上待って本体がさめたことを確かめてから保管してください。

氷点下の場所で保管されることがある場合は...

- 使用時は暖かい場所に1時間以上保管してから使用する。

- 空だき時は顔や手などを近づけないでください。
- 5分以上空だきしないでください。
- ほこり、ちり、湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。

Q & A

Q 薬は使えますか？

A 故障の原因となるため、使用しないでください。
体調不良やめづまり・材料劣化等のトラブルが発生するおそれがあります。

Q かぜや花粉症に効きますか？

A 病気を治療する効果はありません。
のど・鼻の不快感の改善ができます。
スチーム吸入器はのど・鼻をスチームによって潤し、洗浄することで
不快感の改善をおこないます。
かぜや花粉症など病気を治療する効果はありませんが
そのときに現れる「はなづまり」や「のどのイガイガ」、「はなのムズムズ」等の
不快感の改善を行うものです。

Q センソクだけど使ってもよいですか？

A 必ずお医者様と相談のうえ使用してください。

Q 「はなづまり」と「はなムズムズ」と「のどイガイガ」
何が違うの？

A それぞれのスチームの粒の大きさと
スチームの出る方向が違います。
「はなづまり」のときは約4 μ mのスチームが噴出し
「はなムズムズ」では約8 μ m、
「のどイガイガ」は約15 μ mのスチームがそれぞれ噴出します。
「はなづまり」「はなムズムズ」でご使用の場合は鼻方向にスチームが噴出します。
「のどイガイガ」でご使用の場合はのど方向にスチームが噴出します。

Q & A

Q 鼻がつまっても吸入できるの？

A 「はなづまり」モードは非常に微細なスチームが出るので、鼻がつまっても吸入できます。
 ● はなづまりの緩和を目的としたもので、治るわけではありません。

Q 「はなづまり」のとき給排水カップの水が減らないけど、故障？

A 故障ではございません。
 「はなづまり」モードは微細なスチームを発生させるため、給水をほとんど吸い上げません。
 ● 給排水カップには必ず100mLの水道水を入れてください。ヤケドをするおそれがあります。

Q のど・鼻以外には使えないの？

A のど・鼻の吸入以外の目的では使わないでください。
 本商品はのど・鼻専用の商品です。
 のど・鼻以外へのご使用はヤケドや体調不良の原因になるおそれがあります。

Q 市販のペットボトルの水は使えるの？

A 故障の原因となるため、使用しないでください。
 常に新しい水道水を使用してください。
 ミネラル分の多い水の場合、目づまりするおそれがあります。

Q 食塩水や重曹水は使えるの？

A 故障の原因となるため、使用しないでください。
 常に新しい水道水を使用してください。
 目づまりするおそれがあります。

愛情点検		長年ご使用の吸入器の点検をぜひ！	
	このようなことはありませんか？	お願い	故障や事故防止のため、スイッチを切りプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● コードやプラグが傷んでいる。 ● 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。 		

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

おかしい場所	ここを点検	処置
スチームが給排水カップの周辺から漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ボイラーキャップが確実に閉まっていますか？ ▶ スチーム噴出穴が詰まっていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ P.7～P.8参照 ▶ スチーム噴出穴をスチーム噴出穴掃除針で掃除する(P.16参照)
スチームの出が悪い	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 吸入ノズルが確実に「使用」になっていますか？ ▶ 氷点下の場所で保管されていませんでしたか？ ▶ ボイラーキャップが確実に閉まっていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ P.9～P.10参照 ▶ 暖かい場所に1時間以上放置してから使う ▶ P.7～P.8参照
給排水カップの水が減らない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スチーム噴出穴が詰まっていますか？ ▶ チューブが折れていませんか？ ▶ 「はなづまり」モードになっていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スチーム噴出穴をスチーム噴出穴掃除針で掃除する(P.16参照) ▶ チューブをまっすぐにして使う ▶ P.12～P.13参照
湯玉が出る	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 本体を傾けて使っていないですか？ ▶ ボイラータンクに30mL以上の水を入れていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 平らな台に置いて使う ▶ 排水して、30mLの水を入れ直す(P.7～P.8参照)
使用中に「ビシュ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ボイラーケース内の水滴がスチーム噴出穴から噴出するときに発生するもので機能上異常ではありません。 	
吸入アタッチメントが取り付けられない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ボイラーキャップが確実に閉まっていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ P.7～P.8参照
収納カバーが取り付けられない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 吸入ノズルが確実に「収納」になっていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ P.17参照

定格・仕様

販売名	スチーム吸入器 EW6400	粒子径	3～30μm
電源	AC100V(50/60Hz)	本体寸法	高さ255x巾223x奥行99mm
消費電力	190W	質量	約1.0kg
類別	機械器具 76 医療用吸入器	医療機器認証番号	217AKBZX00001000
一般的名称	家庭用電熱式吸入器(JMDNコード71022000)	製造販売業者	松下電工株式会社 彦根工場 滋賀県彦根市岡町33番地
医療機器の種類	家庭用医療機器	製造業者	北京松下電工有限公司 中華人民共和国北京市 经济技术開發区同濟北路1号
給水カップ容量	100mL		
ボイラータンク容量	30mL		
噴霧量	2～10mL/min		

警告

- 絶対に分解したり修理・改造は行わない。発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチーム吸入器の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しております。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の20頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規程に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎていたときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  ハイ 365日
(全国共通番号) **0570-081-365**
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 ☎571-8886 大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190 ☎092-622-0531

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話  ナは 365日
ダイヤル ☎ **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX 
ダイヤル ☎ **0120-878-236**

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

キ
リ
ト
リ
線

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.